



- 1:34 Frau B. steht nachts auf.** my.sens registriert Bewegung in der Wohnung.
- 2:55 Keine Bewegung in der Wohnung – seit über einer Stunde.** Diese ungewöhnlich lange Zeit ohne Bewegung in der Nacht könnte auf eine Notsituation hinweisen. my.sens löst einen Voralarm mit Warnton in der Wohnung aus.
- 3:05 Frau B. hat den Voralarm nicht ausgeschaltet.** my.sens versendet eine Alarmmeldung an die Notrufserviceleitstelle* (oder an die Vertrauenspersonen), da ein Notfall vorliegen könnte.
- 3:06 Die Notrufserviceleitstelle ruft Frau B an.** Sollte Frau B. den Anruf nicht annehmen, veranlasst die Notrufserviceleitstelle sofort weitere Hilfsmaßnahmen.

** Auf Wunsch können die Alarme von einer Notrufserviceleitstelle entgegengenommen werden. Diese erkennt anhand der eingehenden Alarmmeldung sofort, von welcher Wohnung die Meldung verschickt wurde. Es erfolgt direkt ein Anruf bei Ihnen oder den benannten Vertrauenspersonen (Angehörige, Nachbarn, Pflegedienst).*

Sollte der Anruf nicht entgegengenommen werden, können sofort weitere Maßnahmen eingeleitet werden.

Wir empfehlen die Einbindung einer Notrufserviceleitstelle (NSL). Für den Fall einer Notsituation haben Sie und Ihre Angehörigen die Sicherheit, dass schnelle Hilfe möglich wird. Die NSL ist rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr besetzt. Geschulte Mitarbeiter nehmen die Alarmmeldung entgegen und leiten – so wie mit Ihnen zuvor abgestimmt – weitere Schritte ein.

**** Auszeichnungen my.sens:**



Die neue Generation eines Notrufsenders.
*Mehr Lebensqualität durch Sicherheit – fortschrittlich und ausgezeichnet. ***

Das Schutzsystem my.sens wird empfohlen für

- alleinlebende, ältere Menschen
- alleinlebende Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (Diabetes, Schlaganfall- oder Herzinfarkt-Risiko, MS, COPD u.a.)
- oder als zusätzlicher Schutz nach einem Aufenthalt in einer Klinik oder in einer Rehabilitationseinrichtung.

my.sens ist ohne Umbauarbeiten innerhalb von 15-30 Minuten in der Wohnung zu installieren.

my.sens Basis Set: 5 Kombisensoren mit Bewegungsmeldern für die jeweiligen Räume der Wohnung, ein Ein-/Austaster und eine Basisstation. Weitere Sensoren lassen sich je nach Wohnungsgröße integrieren.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.



locate solution GmbH
Bonsiepen 7
D-45136 Essen

Phone +49 201 185566-0
www.locatesolution.de
info@locatesolution.de



my.sens Schutzsystem
*Zu Hause wohnen
aber sicher*





my.sens informiert **automatisch bei Notsituationen.**

Ältere Menschen oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen haben den Wunsch nach einem **selbständigen Leben im eigenen Zuhause.**

Mit my.sens wird ein Schutzsystem vorgestellt, das diesen Wunsch unterstützt.

- **Mehr Lebensqualität, Schutz und Geborgenheit im eigenen Zuhause.**

my.sens bietet Schutz für die Bewohner und Sicherheit für die besorgten Angehörigen, da schnelle Hilfe in Notsituationen möglich wird:

- **Rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr.**

Die Unterstützung der alleinlebenden Person erfolgt durch ein leicht zu installierendes, anwenderfreundliches Sensorsystem, das die Vertrauenspersonen (Angehörige, Nachbarn etc.) oder den Pflegedienst über eine mögliche Notsituation automatisch und schnell informiert.

- **Das aktive Drücken eines Notrufknopfes zur Anforderung der benötigten Hilfe ist nicht mehr erforderlich.**


Intelligente Sensoren liefern Informationen zu Bewegung, Temperatur und Helligkeit in der Wohnung. Hieraus kann my.sens wichtige Hinweise über das Wohlbefinden der dort lebenden Person ableiten.



„Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben.“

Diesem Leitgedanken von Leonardo da Vinci folgend, werden Bewegung in der gesamten Wohnung oder das Einschalten von Lichtquellen als positive Lebenszeichen der dort lebenden Person eingestuft. Ein längerer Zeitraum ohne Bewegung in der Wohnung würde von my.sens beispielsweise als außergewöhnliches Ereignis bewertet. Auf diese Situation reagiert das my.sens System zunächst automatisch mit einem internen Voralarm und Warnton. Sollte dieser Voralarm nicht innerhalb von 10 Minuten ausgeschaltet werden, wird eine Warnmeldung an die Vertrauenspersonen oder an die Notrufserviceleitstelle versendet, da eine Notsituation vorliegen könnte.

Ein Anruf bei dem Bewohner kann **schnelle Sicherheit und Beruhigung** bringen. Sollte der Anruf nicht entgegengenommen werden, können **unverzüglich weitere, erforderliche Schritte** eingeleitet werden.

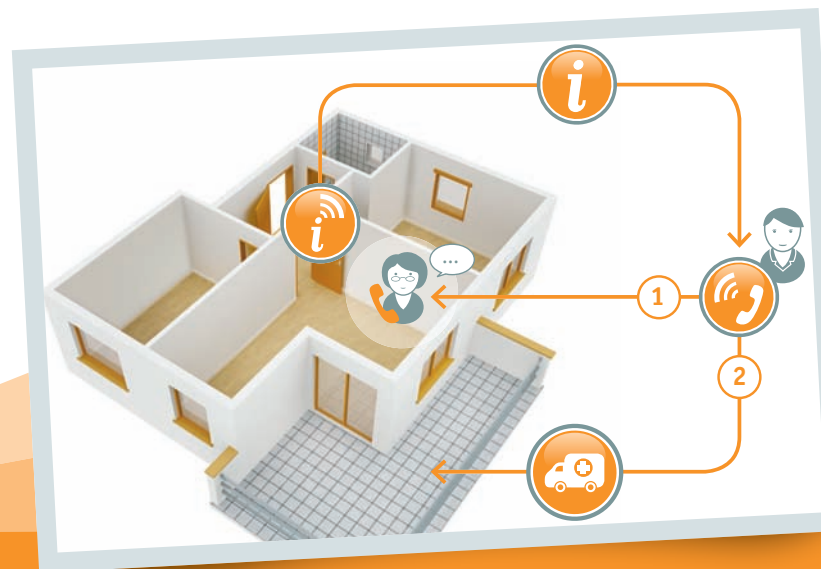

Zuhause wohnen: **Aber sicher.**

Die strengen Vorgaben zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre werden bei my.sens beachtet.

- **Es erfolgt keine Aufzeichnung von Bildern. Eine Kamera ist nicht enthalten.**

Wichtig: Alle persönlichen Messdaten bleiben aufgrund der strengen Datenschutzvorgaben in der wohnungseigenen Basisstation und nur die – durch die abweichenden Werte – erzeugten Warnungen oder Alarme werden automatisch an die benannten Personen oder an eine Notrufserviceleitstelle versendet.

- **Zum Schutz der Privatsphäre werden die Messdaten nicht gespeichert.**

Über einen Ein-/Austaster kann das my.sens System jederzeit ein- oder auch ausgeschaltet werden.

*Registriert my.sens über einen längeren Zeitraum keine Bewegung in der Wohnung, wird **nach einem internen Voralarm automatisch eine Warnmeldung an die Vertrauenspersonen oder eine zertifizierte Notrufserviceleitstelle verschickt**, da eine Notsituation vorliegen könnte. Ein Anruf bei dem Bewohner gibt eine schnelle Rückmeldung (1). Wird dieser Anruf **nicht entgegengenommen**, können weitere, erforderliche Schritte eingeleitet werden (2).*